

Gebrauchsinformation Orthopädische Weste

Dr. Berrehail



POLYSPORT

Produkte für Orthopädie, Sport und Therapie

Liebe Kundin, lieber Kunde,

um Ihre Schulter ruhig zu stellen und Ihre Schmerzen zu lindern, hat Ihnen Ihr Arzt das Tragen einer orthopädischen Weste empfohlen. Nicht ohne Grund, denn die orthopädische Weste Dr. Berrehail ist eine Fertigbandage, die im Gegensatz zu herkömmlichen Haltevorrichtungen oder Verbänden eine Reihe von Vorteilen aufweist – allen voran ihre Flexibilität und ihren außerordentlichen Tragekomfort.

Aktiv und eigenverantwortlich können Sie mit der orthopädischen Weste Dr. Berrehail einen wichtigen Beitrag zu Ihrer Genesung leisten. Wie oft und wie lange Sie die Weste tragen sollten, besprechen Sie am besten persönlich mit Ihrem behandelnden Arzt.

Um Ihnen eine Hilfestellung zur Handhabung und Hygiene zu geben, haben wir diese kleine Gebrauchsinformation für Sie erarbeitet. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um alle Hinweise in Ruhe durchzugehen.

POLYSPORT wünscht Ihnen gute Besserung.

Bequem zu tragen

Da wir Ihnen die Zeit mit Ihrer orthopädischen Weste so angenehm wie möglich gestalten möchten, stand neben orthopädischen Gesichtspunkten auch ein hoher Tragekomfort im Mittelpunkt ihrer Entwicklung.

Das anschmiegsame, elastische Material der orthopädischen Weste Dr. Berrehail sorgt für eine bequeme Lagerung Ihres Armes und einen komfortablen Sitz. Es ist durchgehend perforiert und luftdurchlässig, so dass Ihre Weste äußerst angenehm tragen ist.

Ein weiterer Vorteil: Die orthopädische Weste nach Dr. Berrehail ist sehr leicht, was ebenfalls zu ihrem außerordentlich hohen Tragekomfort beiträgt.

Individuell anpassbar

Die Anatomie jedes Menschen ist anders. Deshalb gibt es die orthopädische Weste Dr. Berrehail in sechs verschiedenen Größen: zwei für Kinder und vier für Erwachsene. Ihr Arzt oder das Sanitäts-haus hat mit Bedacht die richtige Größe für Sie ausgewählt. Durch den hohen Elasthan-Anteil im Material passt sich die Weste jeder Körperform an. Alle Verschlüsse dieser Fertigbandage lassen sich beim Anlegen ganz einfach durch Klettbänder individuell auf Ihre Körpermaße einstellen.

Schnell und einfach an- und auszuziehen

Mit Hilfe der orthopädischen Weste Dr. Berrehail erhalten Sie sich auch nach Ihrer Verletzung oder bei einer Erkrankung größtmögliche Lebensqualität und Bewegungsfreiheit. Denn im Gegensatz zu einem starren Verband können Sie Ihre Weste jederzeit ganz einfach an- und wieder ausziehen. Körperhygiene, Physiotherapie oder Nachbehandlungen sind so ohne großen Zeitverlust und vergleichsweise mühelos durchzuführen.

So ziehen Sie Ihre orthopädische Weste an

Bitte beachten Sie: Diese Beschreibung dient zu Ihrer Unterstützung beim Anlegen der Weste. Allerdings kann sie das persönliche Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder dem Fachmann aus dem Sanitätshaus keinesfalls ersetzen. Das medizinische Fachpersonal zeigt Ihnen bei der Erstanlegung Schritt für Schritt die richtige Vorgehensweise. Später, im häuslichen Bereich, können die meisten Patienten die Weste selbstständig an- und ausziehen. Lassen Sie sich bitte, falls dies notwendig ist, von einer zweiten Person helfen.

A. Vorbereitung

Egal, ob Sie Ihre rechte oder linke Schulter ruhigstellen müssen, Sie können es mit ein und der selben Weste tun. Lediglich die Klettverschlussrichtung ändert sich.

Zuerst nehmen Sie die Weste aus der Verpackung, lösen alle Klettverschlüsse und entfalten die Weste.

B. Anziehen des Abduktors – nach Anpassung gemäß Punkt A

1. Je nachdem, ob die Weste auf der linken oder rechten Schulter getragen werden soll, wenden Sie sie so herum, dass das halbkreisförmige Schulterpolster 1 auf der ruhig zu stellenden Schulterseite liegt und die Unterarmstütze 3 vor dem Körper hängt. (Abb. 1)
2. Nehmen Sie die Weste dann wieder herunter. Die Weste hat auf beiden Seiten Klettverschlüsse. Schlagen Sie diese entsprechend der benötigten Seite um, so dass die nach außen zeigenden Klettverschlüsse von Stoffflaschen abgedeckt sind. Kletten Sie dann Gurt 6 auf Gurt 5 fest. Dies erleichtert Ihnen später das Anbringen von Gurt 6. Legen Sie die Weste jetzt wieder mit dem Schulterpolster 1 auf die ruhig zu stellende Schulter. (Abb. 2)
3. Schließen Sie die Weste vor dem Brustkorb. Passen Sie dabei die Weste durch seitliches Ziehen der beiden Westenteile 2 und 4 in Pfeilrichtung dem Oberkörper und der Schulter genau an. (Abb. 3)
4. Winkeln Sie jetzt den Unterarm der verletzten Seite in der vom Arzt vorgegebenen Position an (meist 90°) und schließen Sie die Unterarmstütze 3 in Richtung Kopf. (Abb. 4)

Für den Fall, dass der Unterarm in 130°-Position stabilisiert werden soll, liegt ein Klettband zur zusätzlichen Fixierung bei.

5. Nun schließen Sie die Ellenbogenstütze 5 unterhalb des Ellenbogens, so dass dieser bequem und sicher in der dafür vorgesehenen Einbuchtung ruht. (Abb. 5)
6. Anschließend lösen den noch verbliebenen Gurt 6 von Gurt 5 ab, ziehen ihn nach vorn und schließen ihn. (Abb. 6)

Ein paar einfache Schritte – und schon wird ihr Arm dank der orthopädischen Weste in der richtigen Position fest und sicher gehalten.



C. Ausziehen der Weste

Sollten Sie Ihre Fertigbandage zur Körperpflege, Krankengymnastik oder Physiotherapie ausziehen wollen, folgen Sie der Beschreibung unter Abschnitt B in umgekehrter Reihenfolge.

Beachten Sie bitte: Die orthopädische Weste ist zwar an- und ausziehbar, doch nur wirklich konsequentes Tragen (gemäß den Vorgaben Ihres Arztes) sorgt für eine schnelle Genesung!

D. Reinigung der orthopädischen Weste

Die Weste lässt sich ganz einfach bei 30°C in der Waschmaschine waschen. Im Interesse einer langen Lebensdauer ist es sinnvoll, vor dem Waschen zu prüfen, ob alle Klettverschlüsse verschlossen sind. Wir empfehlen zudem, die Weste separat zu waschen. Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch einen passenden Wäschebeutel.

Indikationen

Wir empfehlen die orthopädische Weste nach Dr. Berrehail zur Ruhigstellung von Schulter und Oberarm nach Operationen oder konservativer Behandlung u.a. bei folgenden Indikationen:

- Humerusfraktur
- Schlüsselbeinfraktur
- Schultergelenk-Luxation
- Ruptur der Rotatorenmanschette

Kontraindikationen

Bei korrekter Handhabung der orthopädischen Weste treten keine unerwünschten Nebenwirkungen auf. Die Erstanpassung darf nur von medizinischem Fachpersonal vorgenommen werden. Dabei sind die Patienten über das korrekte Anlegen der Weste und über mögliche Risiken durch falsche Handhabung aufzuklären.

Lieferform und Materialangaben

Die orthopädische Weste wird einzeln verpackt und unsteril ausgeliefert. Auf der Verpackung sind Vertreiber, Größe, Bestellnummer und Herstellungsjahr angegeben. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

 REF : Bestellnummer

 : Herstellungsdatum

Die orthopädische Weste wird aus einem perforierten, elastischen Kunstfasergewebe hergestellt.

Gewährleistung und Rücksendung von Produkten

Dieses Produkt wurde unter Beachtung des Medizinproduktegesetzes hergestellt und geprüft. Die einzelnen Bestandteile wurden mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt und entsprechen, wie auch die Herstellung, dem neuesten Stand der Technik.

Die in dieser Gebrauchsinformation gegebenen Informationen sind unbedingt zu beachten. Ein Umtausch wird von der POLYSPORT GmbH nur vorgenommen, wenn eindeutig ein Herstellungsfehler nachgewiesen wird. Es besteht keine Gewährleistung jedweder Art, explizit oder implizit, und keine handelsrechtliche Gewährleistung oder Garantie für Veränderungen, welche vom Anwender selbst am Produkt durchgeführt wurden.

Kein Repräsentant des Herstellers oder der Vertriebsorganisation ist autorisiert, die oben aufgeführten Hinweise zu ändern. Der Hersteller autorisiert weder natürliche noch juristische Personen, Verpflichtungen oder Gewährleistungen an seiner statt zu übernehmen.

Ohne schriftliche Autorisation von der POLYSPORT GmbH dürfen keine Produkte zurückgesandt werden. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden.

Polysport GmbH
An den 30 Morgen 25
D-61381 Friedrichsdorf
www.polysport24.de

Telefon +49 6172 / 93 79 71
Telefax +49 6172 / 93 79 72
Mobil +49 172 / 691 14 19
E-mail nt@polysport24.de

